



Finanziato dall'Unione Europea



CBRN
**Centres
of Excellence**
An initiative of the European Union

CoE65  **CABICHEM**

IL CONTRIBUTO DI UN PROGETTO EUROPEO PER AFFRONTARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS

USCITA – SVESTIZIONE

Le seguenti operazioni devono essere svolte in coppia con un collega.

- 1) Lavare i guanti esterni per immersione (in un secchio di ipoclorito allo 0.5%).
- 2) Lasciare spruzzare la soluzione decon sotto le suole dei calzari.

- 3) Rimuovere il paio di guanti esterno
(con la tecnica del "pizzico e sfilo" come in figura).
→ **Smaltirlo nel contenitore per i Rifiuti Ospedalieri.**



- 4) Di fronte a uno specchio, aprire la cerniera della tuta e sollevare il cappuccio.



- 5) Volgendo le spalle al collega pulito, farsi abbassare la tuta fino alle ginocchia manipolandola solo dal lato interno più pulito.



- 6) Su uno sgabello, rimuovere la tuta, quindi i calzari (prima il destro, poi il sinistro).
→ **Smaltirli nel contenitore per i Rifiuti Ospedalieri, facendo attenzione alla linea sporco/pulito.**



- 7) Rimuovere il paio di guanti interno e indossarne un paio nuovo.



- 8) Rimuovere gli occhiali protettivi toccandoli esclusivamente dall'elastico posteriore. Chinandosi verso l'area sporca,
→ **riporli nel contenitore Occhiali Decon.**



- 9) Chinandosi verso l'area sporca, rimuovere la mascherina FFP3 partendo dall'elastico inferiore evitando di toccare la parte filtrante. Verificare che non venga a contatto con indumenti puliti sotto il mento.



- 10) Rimuovere il secondo paio di guanti interno.
→ **Smaltirlo nel secondo contenitore per Rifiuti Ospedalieri in area sporca.**



- 11) Lavare accuratamente le mani.



- 12) Fare una doccia completa prima di lasciare l'edificio.

