




Finanziato dall'Unione Europea

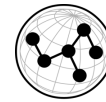

CBRN  
**Centres  
of Excellence**  
An initiative of the European Union

CoE65  **CABICHEM**

IL CONTRIBUTO DI UN PROGETTO EUROPEO PER AFFRONTARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS

## INGRESSO – VESTIZIONE

Le seguenti operazioni devono essere svolte in coppia con un collega.

1) Rimuovere i propri effetti personali (gioielli, orologi, cellulari, penne, ecc.).



2) Lavare accuratamente le mani.



3) Indossare i sovracalzari da seduto.



4) Indossare il primo paio di guanti (strato interno).




5) Indossare la tuta facendosi aiutare da un collega.  
Lasciare il capo scoperto.

→ **Verificare l'adeguatezza della taglia.**



6) Con l'aiuto di un collega, indossare un secondo paio di guanti (strato esterno) adattando il bordo del guanto sopra l'estremità della manica.

→ **Verificare l'integrità e la comodità dei doppi guanti.**

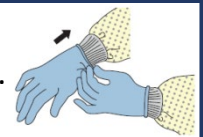

7) Indossare la mascherina FFP3 fissandola dietro la nuca mediante gli elastici annessi e facendola aderire perfettamente sul viso, in modo da coprire naso e bocca.



8) Indossare gli occhiali protettivi fissandoli dietro la nuca mediante l'elastico posteriore. Controllare la collocazione degli occhiali intorno agli occhi.



9) Indossare il cappuccio controllando la copertura del bordo degli occhiali.

Per il personale femminile: raccogliere accuratamente i capelli all'interno del cappuccio.



10) Verificare la comodità della tuta (con un piegamento sulle ginocchia).